


## Mod de utilizare teste Patch

Camerele IQ se prezinta cate 10 pe o banda adhesiva hipoalergenica. Banda cu camere este protejata de o placa de material plastic dur cu 10 compartimente, ce corespund camerelor de pe banda.

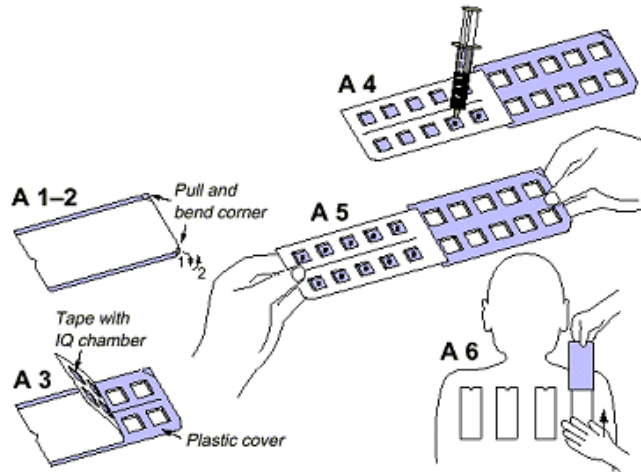

### Instructiuni

**A 1.** Asezati camera IQ pe o masa sau folositi placa de aplicare Chemotechnique. Desprindeti cu fermitate coltul perforat (drept sau stang) al placii de material plastic de protectie.

**2.** Trageti de colt si intoarceti banda cu camerele in sus.

**3.** Trageti pana toate camerele sunt disponibile, fara a desprinde banda de pe placa de material plastic..

**4.** Aplicati preparatul pentru testare incepand din partea dreapta sus. Procedati identic pana toate camerele sunt pregatite pentru aplicare pe spatele pacientului.

(Nu uitati ca pe spatele pacientului ordinea alergenilor va fi de la stanga la dreapta, inversata, partea dreapta va fi nr. 1 stanga)

**5.** Desprindeti banda de pe placa de plastic (fig. A5). Fixati banda pe spatele pacientului de jos in sus (fig. A6). Pentru o fixare cat mai buna tineti apasat cu palma 5 secunde. Folosind camerele IQ puteti pregati mai multe unitati de testare, pastrandu-le in frigider, intr-o punga inchisa, pana la 2 saptamani. Daca adoptati aceasta metoda, marcati pe placa de protectie numele si numarul seriei (ex. Standard 1-10).

**B.** Cand se aplica reactivi lichizi, puneti o picatura de alergen de testare pe hartia de filtru din camera (aprox. 25 µl). Cantitatea ar trebui sa fie suficienta pentru umectarea hartiei de filtru. Apasati hartia de filtru cu o penseta in camera. Nu pregatiti solutiile lichide in avans.

**C.** Cand se aplica patch-ul pe pacient, aplicati-l pe partea superioara a regiunii

dorsale, evitand linia mediana sau omoplatii. In unele cazuri se pot folosi partiile superioare ale bratelor. Daca pacientul are pielea grasa, se poate degresa cu solutie etanolica. Sfatuiti pacientul sa se aplece in fata atunci cand aplicati banda cu testele.

**D.** Faceti un semn in partea stanga a benzii in dreptul camerei 1 si 5 cu marcherul pentru piele Chemotechnique Skin Marker.

Benzi de ranforsare sunt necesare numai in anumite cazuri.

**E.** Patch-urile ar trebui indepartate dupa 48 de ore. Citirea testului se face la 72 de ore de la aplicare. De multe ori este necesara a doua citire la 1 saptamana. Pentru a facilita citirea, se recomanda folosire riglei IQ. In timpul testarii se recomanda ca pacientul sa nu faca dus sau sa faca efort sau exercitii fizice ce ar determina transpiratia.


Consemnati in fisa numerele si numele

fiecarui alergen, incepand cu 1 din partea stanga sus, continuand in jos si la dreapta.

Spatele ar trebui sa nu fie iritat din alte cauze, ce ar determina reactii fals positive.

Pacientul nu trebuie sa faca tratament cortizonic in timpul testarii.

Trebuie evitata expunerea la soare a spatelui.

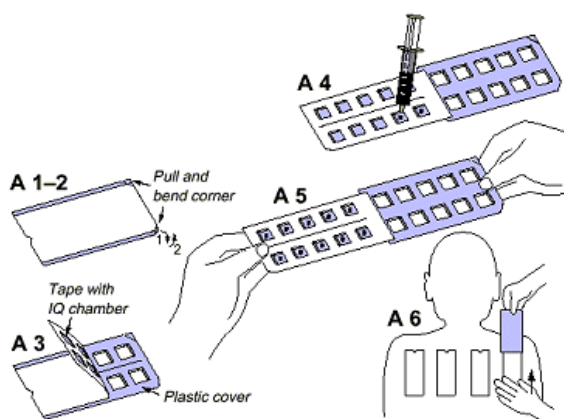

### Interpretarea

Folositi schema urmatoare pentru interpretare:

- Reactie Negativa

? Reactie indoielnica

+ Reactie slaba (non-veziculara)

++ Reactie puternica (edem sau vezicula)

+++ Reactie extrema (ulceratie sau papula)

IR Reactie iritativa

NT Ne testat

Testele Photopatch sunt notate asemanator, dar adaugand prefixul Ph. Relevanta reactiei ar trebui apreciata si inregistrata ca prezenta, atenuata sau de neexplicat. In cazuri incerte se recomanda repetarea unui test cu aplicare descoperita. Testul se aplica in partea superioara a antebratului, pe fata antecubitala de 2 ori pe zit imp de o saptamana. In majoritatea cazurilor de dermatita de contact, apare o dermatita papulara insotita de prurit.